

## Instrukcja - Pobranie próbki śliny




Jeśli zamówiłeś(łaś) badania z tym symbolem:  
Potrzebujemy próbek śliny, które są pobierane przez wymaz z policzka. Proszę dokładnie postępować zgodnie z instrukcjami

**Proszę powstrzymać się od jedzenia lub picia 30 minut przed pobraniem materiału!**  
**NIE płucz ust ani nie myj zębów przed pobraniem materiału!**




- 1 Wyjmij wszystkie dostępne wymazówki z opakowania. Inne zestawy do pobierania próbek nie są wymagane.

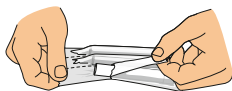

- 2 Jeśli są obecne, to wyjmij probówki z wymazówkami ze sterylnego opakowania.




- 3 Wyjmij pierwszą wymazówkę z probówki dotykając jedynie plastikowej zakrętki.

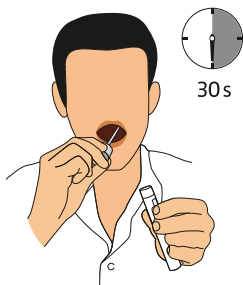


30s

- 4 Przez 30 SEKUND ruchem podobnym do szczotkowania zębów potrzymaj powierzchnię wymazówki wewnętrzną stroną policzka, nad dziąstłami, nad i pod językiem.

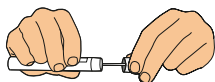

- 5 Włóż wymazówkę z powrotem do pojemnika. NIE umieszczaj pojemnika z powrotem w sterylnym opakowaniu.

- 6 **Powtórz ten proces z każdą zatęczaoną wymazówką.**

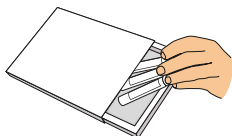

- 7 Umieść wymazówki i wypełniony formularz w pudełku. Jeśli są obecne inne (nieużywane) zestawy do pobierania próbek, to prosimy również o ich zwrócenie!